





Gebrauchsanweisung für chirurgische Einmalinstrumente


Die Artikelnummer **REF** setzt sich aus Buchstaben und Ziffern zusammen. Die ersten beiden Buchstaben SU kennzeichnen das Produkt als von Yellow's medical instruments GmbH hergestellt, die folgenden Buchstaben sind zur Einordnung in der jeweiligen Produktgruppe vorgesehen, die vierstellige Zahl klassifiziert das Produkt in seiner Produktgruppe. Weiterhin ist für jede Artikelnummer ein Barcode vergeben 

Anwendung: Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung am Menschen vorgesehen.


Vor Gebrauch muss sichergestellt werden, dass sich die Einweginstrumente in einem Sterilisationsbeutel befinden und das Zeichen **STERILE EO** für ETO-Sterilisation angebracht ist. Stellen Sie vor dem Öffnen der Sterilverpackung sicher, dass diese noch unversehrt ist. Bei beschädigter Verpackung dürfen die Instrumente nicht mehr verwendet werden!

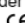
FS ist ein Einmalprodukt, welches nach dem einmaligen Gebrauch nicht mehr verwendet werden darf und ist an der Instrumentenkennzeichnung  ersichtlich. Öffnen Sie die Sterilverpackung erst unmittelbar vor Gebrauch. Zum Öffnen der Sterilverpackung ziehen Sie die Klappen an der Seite auseinander. Berühren Sie das Instrument nur mit sterilen Handschuhen, legen Sie es nur auf sterilen Flächen ab und achten Sie auf eine möglichst keimarme Umgebung.

Achtung bei scharfkantigen Instrumenten! Entfernen Sie die Schutzvorrichtung (z. B. Messerschutz) erst unmittelbar vor Gebrauch.

Lagerung: Die Einweginstrumente müssen kühl, trocken  gelagert werden und sollten nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Lagern Sie die Sterilverpackung nicht in der Nähe von Heizgeräten und vermeiden Sie starke Sonneneinstrahlung. Das Instrument darf nach Ablauf der Sterilitätsdauer  nicht mehr verwendet werden und muss entsorgt werden. 

Entsorgung:  Nach Verwendung des Instrumentes entsorgen Sie es umgehend in den dafür vorgesehenen Behälter für kontaminierten Abfall. Instrumente in beschädigten Verpackungen müssen entsorgt werden. Eine Verwendung des Instrumentes bei einer beschädigten Verpackung ist nicht erlaubt! Achtung bei scharfkantigen Instrumenten – Verletzungsgefahr!

Das Yellow's medical ist ein hochwertiges Produkt aus chirurgischem Stahl und unterliegt strengen Qualitätskontrollen. Sollte es trotzdem vorkommen, dass sie mit der Funktion des Instrumentes nicht zufrieden sind, kontaktieren Sie uns umgehend. Wir produzieren unter dem nachfolgenden CE-Zeichen  0425. Weitere Informationen dazu können Sie erhalten:

Berlin im Okt 2020

 Yellow's medical instruments GmbH | Geschäftsführer: A. Habib | Max-Planck-Str. 3 | 12489 Berlin | Tel.: +49 (0)30 234 58 995 | Fax: +49 (0)30 288 70 554
Mail: sales@yellows-instruments.info | www.yellows-instruments.info